

PROSEPT® Foam – Symbioza pielęgnacji, czyszczenia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i foteli dentystycznych.



PROSEPT® Foam

PROSEPT® Foam jest gotową do użycia pianką służącą do dezynfekcji, czyszczenia i pielęgnacji nieinwazyjnych urządzeń medycznych o delikatnych powierzchniach, takich jak fotele dentystyczne, stoły zabiegowe, nosze, czy komponenty plastikowe. PROSEPT® Foam posiada szeroki zakres zastosowań i skutecznie usuwa bakterie i MRSA w ciągu jednej minuty, oraz wiele patogenicznych wirusów, takich jak HIV, WZW typu B/C, Wirus Grypy, Herpeswirusy i Rotawirusy w ciągu 30 sekund. Innowacyjne połączenie składników czynnych zachowuje skuteczność w obecności zabrudzeń i zapewnia działanie nawet po wyschnięciu produktu. PROSEPT® Foam chroni delikatne powierzchnie i zapobiega rozwarstwianiu i pękaniu materiałów. Bezaldehydowy i bezalkoholowy preparat gwarantuje idealne właściwości czyszczące, jak również brak reakcji wiązania czy odbarwienia przy kontakcie z krwią lub białkiem. Praktyczna butelka z końcówką pianą produkuje gęstą pianę nie zawierającą aerozolu, którą z łatwością nałożysz na problematyczne miejsca. PROSEPT® Foam jest preparatem biodegradowalnym.

Twoje korzyści

- ▶ **Bezalkoholowy**
Bezalkoholowy środek dezynfekujący do stosowania na wrażliwych powierzchniach i przedmiotach takich jak sondy naddźwiękowe czy szkło akrylowe.
- ▶ **Krótki czas ekspozycji**
Aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów takich jak HBV, HCV, oraz HIV w ciągu 60 sekund.
- ▶ **Długotrwała ochrona antybakteryjna**
Działanie antybakteryjne utrzymuje się nawet po wyschnięciu produktu, skutecznie redukując ryzyko ponownego skażenia.

Spektrum zastosowań / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2)	60 sekund
Bakterie odporne na antybiotyki (3)	60 sekund
Gruźliczobójcza (4)	60 minut
Prątkobójcza (4,5)	60 minut
Drożdżobójcza (1,6)	60 sekund
Drożdże odporne na antybiotyki (7)	60 sekund
Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,9)	30 sekund
Wirus wirusowej biegunki bydła (8)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu B (8,9)	30 sekund
Wirus zapalenia wątroby typu C (8,10)	30 sekund
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (11)	30 sekund
Ludzki wirus niedoboru odporności (8,9)	30 sekund
Wirus grypy typu A H1N1 (11)	30 sekund
Wirus krowianki szczep Elstree (8)	30 sekund
Wirusobójcze (11,12)	60 minut
Adenowirus typu 5 (11)	60 minut
Wirus polio typu 1 LSc-2ab (11)	60 minut
Rotawirus szczep Wa (11)	30 sekund

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN 14349*, EN 14561*, (3) Acinetobacter baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (4) EN 14348, EN 14563*, (5) EN 14204, (6) EN 1275, EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (7) CaDR, (8) wytyczne RKI/DVV, (9) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (10) wirus zastępczy dla wirusa bydłowej biegunki wirusowej, (11) EN 14476, (12) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-011008 Butelka 200 ml z dozownikiem pianowym

Twój lokalny dystrybutor

HIGIENA-DENT
ul. Partyzantów 16
05-860 Plochocin
Polska
Telefon: +48 22 208 63 00
higienadent@gmail.com
www.higienadent.com



HIGIENA-DENT